

MAXUS[®]

ULTRA PREMIUM CONDOMS




ВЫБЕРИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Инструкция по подбору идеального
размера презерватива

ШАГ 1. ИЗМЕРЬТЕ ОБХВАТ

В состоянии полной эрекции оберните мягкую ленту или полоску бумаги вокруг самой широкой части пениса

Отметьте место пересечения

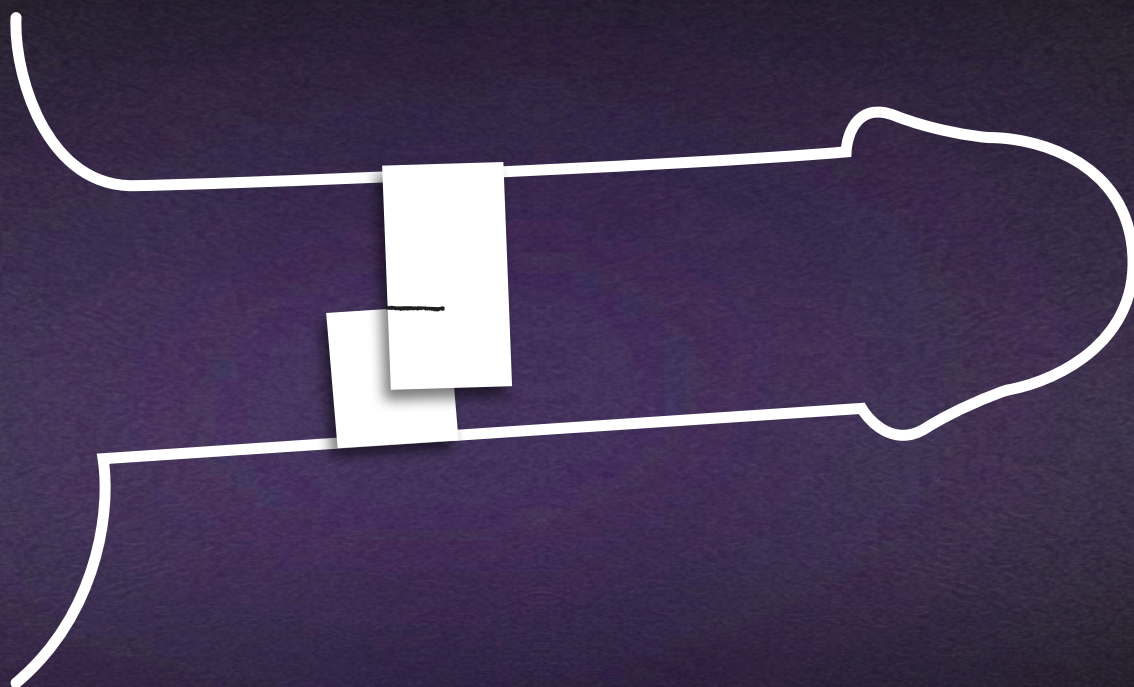


 **Совет:**

Не затягивайте слишком сильно, чтобы измерение было комфортным



ШАГ 2. ОПРЕДЕЛИТЕ ОБХВАТ

Разверните ленту/бумагу
и измерьте длину
в сантиметрах линейкой

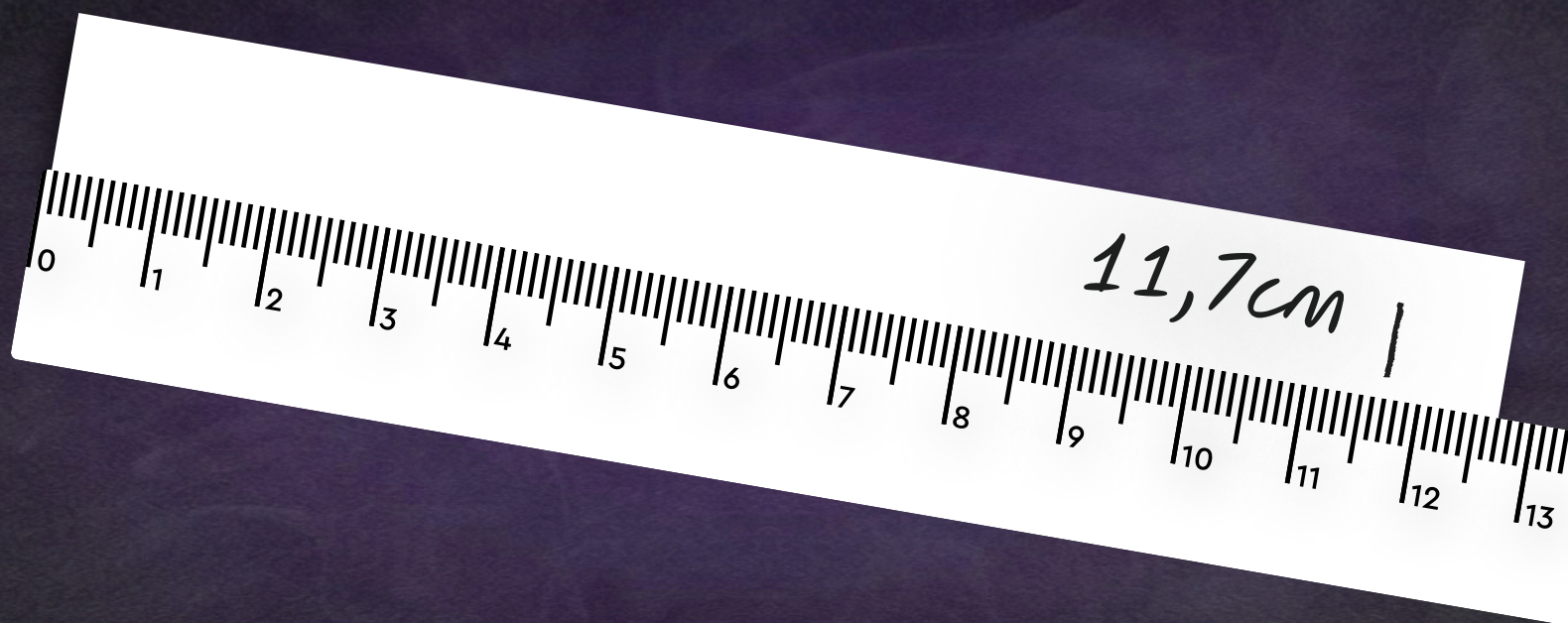

✨ **Важно:**

Именно обхват, а не длина,
определяет размер



ШАГ 3. СВЕРЬТЕСЬ С ТАБЛИЦЕЙ РАЗМЕРОВ

Найдите полученный обхват в таблице
и узнайте **свой идеальный размер**

Обхват пениса, мм	Линейка CUSTOM MADE	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм
115–123	 56	190	56
123–135	 60	210	60
135–143	 64	210	64

Совет:

Для плотной посадки:
выберите на один размер меньше

Для свободной посадки:
выберите на один размер больше